



# Magnum

Andador de exterior

## MANUAL DE USUARIO

Ref. AALMAGNUM

más de 50 años viviendo sin límites

### ! Nota importante

Las características técnicas indicadas son orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.

**TotalCare Europe**

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

[www.totalcare-europe.com](http://www.totalcare-europe.com)

DESDE TOTALCARE EUROPE

# LE AGRADECEMOS SU CONFIANZA

Gracias por adquirir un producto de **IM** by **TotalCare Europe**.

El producto que usted ha adquirido está dotado de la más avanzada tecnología y ha soportado las pruebas más exigentes.

La experiencia a lo largo del tiempo hace que nuestros productos ofrezcan las mejores prestaciones, haciendo que usted pueda disfrutar cada día más de la libertad y autonomía que necesita.

Le sugerimos que dedique un momento para leer las instrucciones que le proporcionamos. Así podrá familiarizarse con su nuevo andador para exterior **Magnum**, que le permitirá obtener el máximo rendimiento y vida útil de este.

más de **50 años** viviendo **sin límites**

# GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA.

Importante leer el manual antes de utilizar el producto.

<b>1 — Partes del andador .....</b>	<b>4</b>
<b>2 — Descripción del producto .....</b>	<b>4</b>
<b>3 — Características del producto .....</b>	<b>5</b>
<b>4 — Uso y montaje.....</b>	<b>7</b>
<b>5 — Seguridad y más información.....</b>	<b>9</b>
<b>6 — Mantenimiento y limpieza .....</b>	<b>9</b>
<b>7 — Garantía.....</b>	<b>10</b>

## 1. PARTES DEL ANDADOR



## 2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### ANDADOR PLEGABLE PARA EXTERIOR CON CESTA DE GRAN CAPACIDAD

El andador con asiento Magnum está fabricado en aluminio, un material ligero que facilita su uso continuado y sin esfuerzo por parte del usuario.

Su diseño incorpora un sistema de plegado rápido y sencillo, ideal para ahorrar espacio en interiores y facilitar su transporte.

Está disponible en tres tallas: 41 cm, 43 cm y 46 cm, con una profundidad de asiento de 25 cm.

Incluye una práctica bolsa de transporte con cierre de velcro, que puede llevarse cómodamente al hombro gracias a su correa ajustable. El modelo de talla 43 cm se ofrece en tres elegantes colores anodizados: azul, fucsia y negro.

Disponible también el andador Magnum Plus, incluye reposapiés individuales para convertirlo en silla de ruedas manual.

3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



INFORMACIÓN GENERAL

Medidas	Talla 41	Talla 43	Talla 46
Ancho total	57 cm	58 cm	63 cm
Ancho ruedas traseras	41 cm	42 cm	46 cm
Profundidad total	68 cm		
Alto total (regulable)	80 - 96,5 cm		



Medidas plegado		
Ancho plegado	24 cm	
Alto total plegado	80 cm	
Profundidad plegado	65,5 cm	

Peso	
Peso total	7,90 kg
Peso máximo soportado	136 kg

Material	Aluminio
----------	----------

Color	Azul / Fucsia / Negro (anodizado)
-------	-----------------------------------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Asiento

Ancho del asiento	40 cm / 42 cm / 45 cm
Ancho útil para sentarse	41 cm / 43 cm / 46 cm
Profundidad del asiento	25 cm
Alto del asiento al suelo	53 cm
Material del asiento	Tela ignífuga con respaldo

Ruedas



Medidas ruedas delanteras	Ø19,5 cm
Medidas ruedas traseras	Ø19,5 cm
Ancho ruedas delanteras	3 cm
Ancho ruedas traseras	3 cm
Tipo de ruedas	Macizas
Tipo de freno	Freno maneta

Bolsa

Ancho de la bolsa	31 cm
Alto de la bolsa	32 cm
Profundidad de la bolsa	10 cm
Peso soportado de la bolsa	5 kg
Material de la bolsa	Nailon

Otras características

Respaldo	Sí, de nailon
Medidas embalaje (ancho x alto x profundo)	60 x 35 x 27 cm
Tipo de plegado	Cruceta
Portabastón	Sí

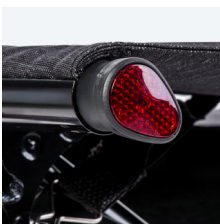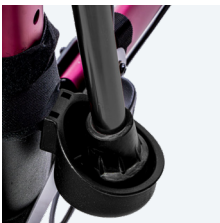

## 4. USO Y MONTAJE

### 4.1. SAQUE EL ANDADOR DE LA CAJA

Antes de empezar, en la caja verá una bolsa con cuatro tornillos de perilla.



### 4.2. USO DEL DESPLEGADO

**Paso 1:** Baje ambas ruedas delanteras y fíjelas firmemente con dos tornillos de perilla uno en cada extremo de la parte superior de la rueda.



**Paso 2:** Ahora debe de realizar la misma acción anterior pero con las ruedas traseras.



**Paso 3:** Despliegue el asiento.



**Paso 4:** Coloque el mango de altura ajustable donde mejor le vaya, para cambiar la altura, presione en el pasador de bloqueo plateado, sabrá que la altura ha quedado completamente fija cuando vea el pasador entre uno de los ocho agujeros.



**Paso 5:** Coloque la bolsa en la percha del andador y use el velcro para fijarlo en el marco.



### 4.3. USO DEL PLEGADO

Para realizar el plegado, puede ayudarse del apartado "4.2. Uso del desplegado", siguiendo las instrucciones a la inversa.

**Paso 1:** Retire la bolsa de la compra del marco.

**Paso 2:** Extraer la empuñadura regulable.

**Paso 3:** Tire de la banda de bloqueo en el medio del asiento hacia arriba; el andador se pliega.

**Paso 4:** Afloje los tornillos del pomo de las ruedas delanteras y luego pliegue las ruedas hacia arriba.

**Paso 5:** Utilice los tornillos de la perilla para bloquear las ruedas.





## 4.4. USO DEL FRENO

**Freno de servicio (al empujar):** tire de las palancas de freno hacia arriba.

**Freno de estacionamiento (al estacionar y usar la función de asiento):** presione las palancas de freno hacia abajo.



## 4.5. MONTAJE DEL PORTA BASTÓN

Con la ayuda de un tornavis, coloque el tornillo en el agujero visible.



## 4.6. USO DEL REPOSAPIÉS (DISPONIBLE SOLO EN EL MODELO: MAGNUM PLUS)

El modelo Magnum Plus está equipado con reposapiés individuales, lo que permite utilizar el andador como una silla de ruedas manual.

**Plegado y desplegado de los reposapiés:** los reposapiés pueden plegarse o desplegarse fácilmente, según se utilice el dispositivo como andador o como silla de ruedas..

En caso de que se quiera utilizar como silla de ruedas, se debe desplegar los reposapiés. Sujete el reposapiés y tire suavemente hacia arriba para desbloquear el mecanismo. A continuación, gírelo hacia el interior hasta que quede completamente desplegado y escuche un "clic", lo que indica que está fijado correctamente..

Para plegarlos, repita el procedimiento en sentido inverso: tire hacia arriba y gírelo hacia su posición plegada hasta que encaje con un "clic".

**Importante**, antes de utilizar el Magnum Plus como silla de ruedas, asegúrese de que ambos reposapiés estén correctamente desplegados y que el respaldo esté girado en la posición adecuada para garantizar una postura cómoda.



**Regulación en altura de los reposapiés:** para regular la altura del reposapiés, retire el tornillo de sujeción con una llave allen sujetando la tuerca con una llave fija. Mueva la abrazadera de plástico a la posición deseada de entre los 3 agujeros. Coloque el reposapiés de nuevo a la altura escogida y atornille.





## 5. SEGURIDAD Y MÁS INFORMACIÓN

- Solo usar el asiento para estar sentado y quieto.
- Nunca sentarse y empujar con los pies.
- No utilizar para subir o bajar escalas, escaleras mecánicas o cintas transportadoras.

Consulte siempre con su médico o terapeuta para determinar el uso y ajuste adecuado de la regulación de la altura para obtener el máximo apoyo y la correcta activación del freno.

Asegúrese que ambos pomos de ajuste de altura estén bien apretados y que los puños están a la misma altura. Pruebe la estabilidad antes de usarlo.

Asegúrese que el andador está completamente abierto, el asiento en posición y las bisagras desplegadas correctamente. Comprobar que los ajustes de altura sean los correctos y que las ruedas se mueven libremente antes de utilizarlo. Respete el límite de peso del producto.

Reemplace las ruedas cuando estén desgastadas o dañadas. Comprobar las ruedas delanteras semanalmente para detectar signos de daños.

Suspenda el uso del andador si comprueba que las ruedas están flojas y vuelva al lugar donde las compro para ajustarlo. No exponer a temperaturas extremas ( muy altas o muy bajas ), humedad o que se moje, para evitar deformaciones de las piezas de plástico.

Todas las ruedas tienen que estar en contacto con el suelo a la hora de utilizar el andador para que esté equilibrado.

### Para evitar que vuelque:

- No intente alcanzar objetos si tiene que moverse hacia adelante mientras esté sentado en el andador. No cuelgue nada en el andador.
- El respaldo debe estar siempre en su sitio y no está diseñado para soportar todo el peso corporal.
- Si quiere alcanzar o recoger algún objeto debe colocar ambos pies firmemente en el suelo.
- No añadir más peso al andador cuando esté sentado. No use el asiento si se encuentra en una pendiente o terreno irregular.
- La cesta tiene una capacidad de 5 kg. Y los objetos no deben sobresalir de ella. Para frenar el andador temporalmente, presione hacia abajo las dos empuñaduras a la vez.

## 6. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

### Mantenimiento

La suciedad normal en las piezas de metal y plástico se puede eliminar con agentes de limpieza normales.

Compruebe el contenido de los agentes de limpieza y utilice únicamente productos adecuados para la limpieza y desinfección. No utilice disolventes o agentes de limpieza abrasivos a pesar de la estructura sólida y el uso de materiales resistentes y anticorrosivos, el andador está sujeto a desgaste, por lo tanto, se recomienda revisar el andador con regularidad (una vez al año como mínimo).

Dicho control debería comprender: Un control visual de todas las partes del marco: si han sido dobladas, dañadas, gastadas o corroídas y, en particular, un control de lo siguiente

- Estructura del andador.
- Barras de empuje, asas y correa.
- Mangos de freno y cables de freno.
- Horquillas y ruedas delanteras.
- Ruedas traseras frenadas.
- Asiento y dispositivo de bloqueo.
- Bolsa de compras.
- Compruebe si falta alguna pieza de montaje (por ejemplo, tuercas, tornillos, remaches...) y si funcionan y están bien apretados.
- Compruebe el funcionamiento de los frenos bajando la velocidad y frenando las ruedas.

La limpieza y desinfección deben realizarse a intervalos regulares. Use una solución jabonosa suave sin abrasivos.

## 7. GARANTÍA

### DURACIÓN DE LA GARANTÍA

El producto adquirido por Ud. queda protegido por la presente garantía, por la falta de conformidad del cliente que se manifieste en el plazo de 3 años desde la fecha de compra del producto o la fecha de entrega.

### ALCANCE DE LA GARANTÍA

La garantía cubre toda avería o defecto de fabricación durante los primeros 24 meses desde la compra del producto, a partir de los 2 años y hasta los 3 años, el consumidor debe seguir dirigiéndose a la parte vendedora para conseguir reparar la falta de conformidad del bien, pero en el caso necesario el usuario deberá demostrar que el producto esta defectuoso por fabricación y no por un mal uso o una falta de mantenimiento.

El alcance territorial de esta Garantía es para todo el territorio nacional español.

La presente Garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a lo establecido en el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en defensa de los consumidores.

### PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

Para poder hacer efectiva la Garantía el consumidor deberá dirigirse al punto de venta donde adquirido el producto, en el caso de que le sea imposible la comunicación con el punto de venta, ya sea porque ha cerrado o porque ha adquirido el producto en otra comunicad autónoma, se podrá dirigir directamente al fabricante a través del correo electrónico [info@totalcare-europe.com](mailto:info@totalcare-europe.com).

Es imprescindible presentar copia de la factura o del ticket de compra, o un albarán de entrega posterior a la factura o ticket, en el momento de la reclamación, donde ampare claramente el producto comprado y la fecha.

El consumidor deberá entregar el producto en el mismo lugar que los adquirió, acompañando una nota explicativa de la falta de conformidad.

### LA PRESENTE GARANTÍA NO CUBRE

- Los daños causados por mal uso por parte del usuario al no obedecer las instrucciones indicadas en este manual o causadas por otros factores humanos, mal uso, colisión con algún objeto...
- Los daños causados por accidente, abuso, negligencia o mal uso.
- Los daños causados por fuego, inundación, tormentas o cualquier evento de la naturaleza.
- Los productos que hayan sido previamente reparados o manipulados por personal no autorizado por el fabricante o vendedor.
- Si las piezas utilizadas no son fabricadas por nuestra empresa.
- Cualquier producto que no lleve o tenga alterado o borrado su numero de serie o de fábrica.
- La garantía no cubre los elementos de desgaste.
- Las reparaciones o sustitución de la pieza defectuosa serán efectuadas por un personal cualificado y autorizado por TotalCare Europe, S.L.

**NO UTILICE ESTE PRODUCTO SI APARENTEMENTE ESTÁ DAÑADO O LE FALTAN PIEZAS.**

**CONTACTE CON SU PROVEEDOR.**

# *magnum*

El andador con asiento Magnum, está fabricado en aluminio, material ligero que permite un uso continuado por parte del usuario.



**Leyenda etiquetaje.**



Conformidad Europea.



Debe consultar las instrucciones de uso para obtener información de seguridad.



Consulte el manual de usuario antes de utilizar el producto.



Datos del fabricante.



Fecha de fabricación.



Representante Europeo.



Lote.



Referencia del producto.



Número de serie.



Producto sanitario conforme con el MDR.

**Manual de usuario**

Andador de exterior Magnum

**V10 · 12/05/2025**