


Bischoff & Bischoff


Manual de instrucciones

BB-80



Enjoy mobility.

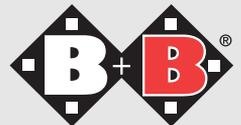

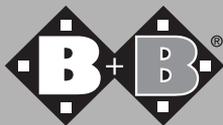

Estimado cliente:

Con la adquisición de este accesorio de asistencia en el baño obtiene un producto alemán de primera calidad que ya ha sido acreditado en aplicaciones profesionales en numerosas ocasiones. Este manual de instrucciones le ayudará a familiarizarse con el manejo y el funcionamiento del accesorio de asistencia en el baño B+B y así sentirse más seguro. Esperamos que disfrute de nuestro producto.

Soportes para la alcachofa de la ducha

Asidero
Jabonera

1. Atención: indicaciones de seguridad (Análisis de riesgo según DIN EN ISO 13485)


- 100 kg de capacidad de carga máxima
- La tabla de bañera solo puede utilizarse a temperaturas de entre +3 y +70 °C.
- Si se sienta en el borde delantero corre el riesgo de caerse.



Siga las instrucciones de montaje de las páginas 2 y 3, así como las indicaciones de la seguridad.



Atención: lea atentamente estas instrucciones de uso y montaje. Tenga cuenta especialmente las indicaciones de seguridad.

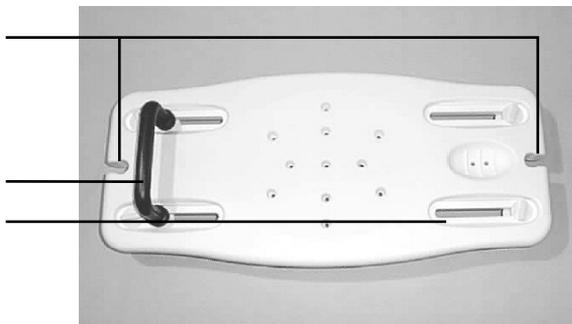

La tabla de bañera BB-80 le permite bañarse cómodamente sentado. La jabonera integrada y los soportes para la alcachofa de la ducha de ambos lados de la tabla facilitan su práctico manejo.

2. Imagen desde abajo

Gomas antideslizantes

Las gomas antideslizantes impiden que la tabla se deslice y que se dañe el borde de la bañera.

Fijación de las gomas antideslizantes

Presione para introducir las gomas en las fijaciones.

3. Distancia entre las bases de apoyo

Antes de fijar las gomas, ajuste la distancia de las bases de apoyo a la distancia del lado interior de la bañera. La distancia puede ajustarse correctamente en todas las bañeras convencionales. A continuación apriete los tornillos.

Distancia mín: A = 45 cm

Distancia máx: B = 72 cm

An./al./pr.: 79/14/37 cm

Peso: 2,4 kg

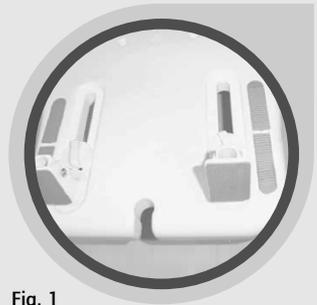


Fig. 1


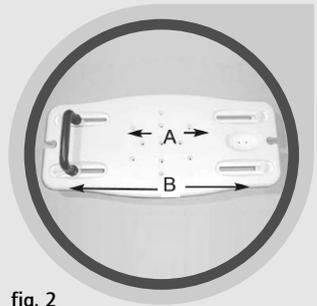


fig. 2

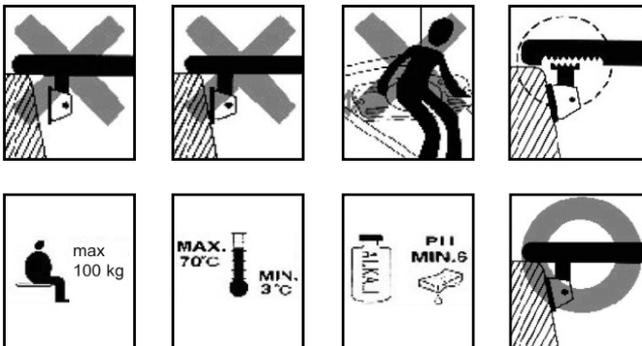

Certificado de garantía

(Observe nuestras condiciones generales)

Modelo: Tabla de bañera BB-80

Número de serie:*

(debe anotarlo el distribuidor)

Distribuidor:

Fecha y sello

* Consulte las placas indicadoras en el margen lateral

MOVILIDAD B&B IBERIA, S.L.

C/ Osona, 2 Ed. Hydira oficina D-1

Parc de Negocis Mas Blau • E-08820 El Prat de Llobregat

Tel.: +34 931 600 029 • Fax: +34 934 781 423

www.bischoff-bischoff.com

el fabricante: Bischoff & Bischoff GmbH

Becker-Göring-Straße 13 • D-76307 Karlsbad

Tel.: +49 (0)700/6000 7070 • Fax: +49 (0)700/6000 8080

www.bischoff-bischoff.com

info@bischoff-bischoff.de

