

Manual de usuario

Scooter Mallorca




Gracias,

por adquirir un producto de **TotalCare Europe**.

El producto que usted ha adquirido está dotado de la más avanzada tecnología y ha soportado las pruebas más exigentes.

La experiencia a lo largo del tiempo hace que nuestros productos ofrezcan las mejores prestaciones, haciendo que usted pueda disfrutar cada día más de la libertad y autonomía que necesita.

Le sugerimos que dedique un momento para leer las instrucciones que le proporcionamos. Así podrá familiarizarse con su nuevo scooter Mallorca, que le permitirá obtener el máximo rendimiento y vida útil de este.

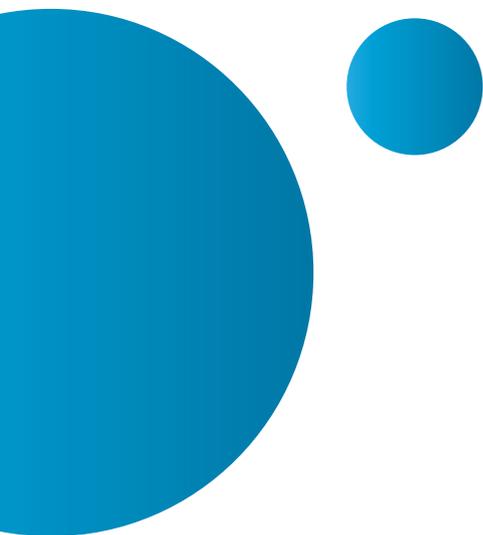

Guía de referencia rápida

Importante: Leer el manual antes de utilizar el producto.

	Partes del scooter Mallorca	pág. 4-5
1	Especificaciones técnicas	pág. 6
2	Consejos de seguridad	pág. 7
3	Ajustes	pág. 8
4	Panel de control	pág. 9
5	Operación de liberación de freno/rueda libre	pág. 11
6	Empezando a conducir	pág. 12
7	Almacenamiento	pág. 14
8	Baterías y cargadores	pág. 14
9	Mantenimiento	pág. 16
10	Solución de problemas	pág. 17
11	Más información	pág. 18
12	Garantía	pág. 21



Partes del Scooter Mallorca

- 1 Cesta de la compra
- 2 Espejos retrovisores
- 3 Asiento acolchado y respaldo abatible
- 4 Apoyabrazos ajustables y abatibles
- 5 Ajuste giratorio de asientos y deslizador de profundidad del asiento
- 6 Amortiguadores traseros
- 7 Ruedas neumáticas
- 8 Luces LED delanteras
- 9 Pomo de ajuste manual del manillar

1 Especificaciones técnicas

Dispositivo médico de clase 1 (93/42 / CEE modificado por 2007/47 / CE)

Vehículo de clase 2 para interiores / exteriores (Ley de uso de vagones inválidos en carreteras)

Tamaño global

Longitud	1280 mm
Ancho (brazos)	600 mm
Ancho (espejos)	730 mm
Ancho (Ruedas)	630 mm
Altura máxima (con espejos)	1170 mm
Batería	2x38Ah
Peso máximo del usuario	136 kg
Alcance	32Km
Cargador de batería	3 Ah
Altura del asiento al piso	560 mm
Radio de giro	1550 mm
Pendiente de trabajo segura	8 °
Peso total	94 kg
Max. Velocidad	6.4 kmph

Dimensiones del asiento

Ancho del asiento	480 mm
Altura del respaldo	530 mm
Profundidad del asiento	410 mm

2 Consejos de seguridad

- » Lea este manual detenidamente antes de usar su scooter.
- » Apague la alimentación cuando transfiera desde y hacia el scooter.
- » Seleccione una velocidad lenta cuando baje pendientes (máx. 8 °) o sobre terreno irregular.
- » Mantenga los pies sobre el scooter mientras conduce.
- » Asegúrese de que el asiento esté en una posición fija mirando hacia adelante antes de conducir.
- » Asegúrese de que el manillar esté ajustado.
- » Asegúrese de que las baterías estén completamente cargadas antes de su viaje.
- » Evite terrenos irregulares o blandos siempre que sea posible.
- » Esté atento a otros usuarios de la carretera y peatones.
- » Apague la alimentación cuando no esté en uso.
- » Siga la guía de mantenimiento para garantizar un funcionamiento seguro del scooter.
- » Siempre retire las llaves si deja el scooter desatendido. Las personas / niños no autorizados pueden usar el scooter y provocar lesiones.
- » Intentar inclinarse si la superficie es resbaladiza.
- » Girar bruscamente a toda velocidad.
- » Salir/entrar del scooter a menos que la alimentación esté apagada.
- » Desconectar la alimentación mientras conduce: esto hará que el scooter se detenga bruscamente.
- » Usar el scooter donde no pueda caminar de manera segura o legal.
- » Intentar subir o bajar bordillos, excepto bordillos desplegables.
- » Usar el scooter si está bajo la influencia del alcohol o cualquier medicamento.
- » Sentarse en el scooter si se transporta en un vehículo.
- » Intentar remolcar cualquier otro vehículo.
- » Superar el límite de peso establecido.
- » Conectar cualquier otro dispositivo a las baterías, ya que esto podría causar daños permanentes y anular su garantía.
- » Utilizar cualquier otra batería / cargador que no sea suministrado por TOTALCARE EUROPE.
- » Viajar a través del agua o sobre terreno blando (barro, arena, etc.)
- » Levantar el scooter por el conjunto de la cubierta o cualquier pieza de plástico.
- » Cambiar bruscamente su centro de gravedad, ya que esto podría hacer que el scooter sea inestable.
- » Poner rueda libre cuesta abajo. Esto dañará el motor y el freno y anulará la garantía.

No debe:

- » Llevar pasajeros.
- » Superar pendientes de más de 8 °.

Se han tomado todas las precauciones para garantizar que su scooter le brinde un servicio seguro y confiable siempre que cumpla con los consejos anteriores.

3 Ajustes

Ajuste del manillar

En la parte inferior derecha del scooter, encontrará el pomo de ajuste del ángulo del manillar. Para ajustar el ángulo, afloje el pomo girando en sentido antihorario. Una vez que se alcanza el ángulo deseado, apriete el pomo girando en sentido horario. Asegúrese de que el manillar está completamente ajustado antes de usar el scooter.



Asiento giratorio

El asiento tiene una base giratoria bloqueable para permitir transferencias más fáciles. Simplemente empuje la palanca en círculo hacia adelante y gire el asiento al mismo tiempo. Al soltar la palanca, el asiento se bloqueará en su posición. El asiento se bloquea en intervalos de 45 grados. Asegúrese siempre de que el asiento esté bloqueado antes de subir o bajar del scooter. El asiento siempre debe estar bloqueado mirando hacia adelante mientras conduce.



Desmontaje del asiento

Para quitar el asiento, pliegue la parte posterior del asiento y simplemente levante el asiento del chasis mientras levanta la palanca giratoria del asiento.

No cuelgue equipaje u otros objetos en el respaldo del asiento ya que esto puede afectar la estabilidad.

Ajuste de altura del asiento



Retire el asiento como se describió anteriormente. Desenrosque el tornillo de bloqueo del marco y ajuste el asiento a la altura deseada. Vuelva a colocar el tornillo de bloqueo. Vuelva a colocar el asiento como se describe anteriormente en la sección de extracción del asiento.

! Cuanto más alto se ajusta el asiento; la estabilidad puede verse afectada debido al mayor centro de gravedad.

4 Panel de control





① *Indicador de batería*

Este medidor le brinda una guía sobre la cantidad de carga que queda en las baterías del scooter. Esto le dará la lectura más verdadera cuando el scooter esté en movimiento

Siempre cargue completamente las baterías antes de conducir su scooter y nunca permita que las baterías se agoten por completo, ya que esto puede causar daños permanentes en las baterías.

② *Bocina*

El botón acciona la bocina del scooter. Esto solo debe usarse para advertir a otros de su presencia y no como una reprimenda de ninguna forma.

③ *Botón de velocidad máxima*

El control de velocidad le permite establecer la velocidad máxima del scooter. Gire en sentido horario para aumentar la velocidad máxima y en sentido antihorario para disminuir.*

* Comience siempre a baja velocidad hasta que se acostumbre a las características de su scooter. No ejerza demasiada presión sobre la palanca. Solo gire hasta que pare.

Cuando conduzca en áreas peatonales, como áreas de compras y áreas ocupadas en el pavimento, siempre respete a los demás peatones y baje la velocidad máxima para que el scooter viaje al ritmo de caminar de los que lo rodean.

④ *Luces delanteras*

Este botón opera el faro LED.

⑤ *Encendido/apagado*

El interruptor de llave se encuentra en el lado derecho de la barra del manillar. Simplemente inserte la llave y gírela en sentido horario para encenderla. La pantalla se iluminará para indicar que la alimentación está encendida. Puede haber un ligero retraso antes de que funcionen las palancas manuales mientras el controlador verifica los circuitos del scooter.*

* Nunca deje la llave en el interruptor desatendida para evitar el uso no autorizado. No apague la alimentación para detener el scooter a menos que sea una emergencia. El scooter se detendrá bruscamente si se detiene de esta manera.

5 Operación de liberación de freno / rueda libre

La palanca de liberación del freno está situada en la parte trasera derecha del scooter. Esta palanca le permite desenganchar el mecanismo de manejo y empujar el scooter en modo 'rueda libre'. Para desengranar la transmisión, empuje la palanca hacia adelante hasta llegar a la posición de parada (indicada por la dirección 'N').

Simplemente empuje la palanca hacia la parte posterior del scooter para volver a enganchar el mecanismo de manejo (posición 'D'). El scooter no funcionará cuando la palanca esté en la posición desenganchada. El scooter debe apagarse y encenderse mediante el interruptor de encendido para restablecer los circuitos antes de que reanude el funcionamiento normal. El scooter emitirá un pitido continuo si el freno se desacopla al encenderlo.



Nunca deje el scooter desatendido mientras esté en el modo de rueda libre, ya que rodará por una pendiente. El modo 'rueda libre' solo debe usarse en una emergencia para mover el scooter debido a un corte de energía.

NUNCA mueva el scooter en este modo mientras esté ocupado. **NUNCA** remolque el scooter.

Cuando está en modo de rueda libre, el scooter puede ser empujado en terreno llano a un ritmo de caminata. El scooter se 'frena automáticamente' si se excede esta velocidad.

Nunca se sienta en el scooter y libere la rueda cuesta abajo, ya que esto puede causar daños permanentes en el motor, el freno y el controlador debido al frenado regenerativo excesivo. Como arriba, el scooter solo se puede mover a un ritmo de marcha cuando está en modo de rueda libre.

6 Empezando a conducir



Lista de verificación

Verifique lo siguiente antes de su uso

- » Debe cargar completamente las baterías antes del primer uso. ('Ver baterías y carga')
- » Monte el scooter levantando el brazo y deslizándose en el asiento.
- » Asegúrese de que el asiento esté bien bloqueado en la posición delantera antes de conducir.
- » Ajuste la barra del manillar y el asiento si es necesario. (Ver 'Ajustes')
- » No use la barra del manillar para apoyarse completamente durante la transferencia.

La velocidad y la dirección del Scooter se controlan con la palanca de aceleración. Las flechas que se muestran en la imagen de arriba muestran la dirección en la que se moverá el scooter cuando se opera la palanca como se indica.

Moverse

Inserte la llave y encienda la alimentación e inicialmente configure el control de velocidad en una configuración baja. Cuanto más empuje la palanca, más rápido viajará el scooter, pero solo hasta la velocidad máxima que se haya seleccionado. Suelte la palanca y el scooter se detendrá suavemente.

NO apague la alimentación para detener el scooter, ya que esto hará que la transmisión se bloquee y el scooter se detenga bruscamente, lo que podría causar lesiones. Este procedimiento solo debe usarse en una emergencia.

Dirección

NUNCA gire bruscamente a altas velocidades ya que puede hacer que el scooter sea inestable. La velocidad máxima debe establecerse en 50 %.


No retroceda en una vía principal.

La dirección del scooter es ligera y fácil. Asegúrese de dar a los obstáculos un amplio espacio libre para evitar que las ruedas traseras se enganchen. Cuando conduzca por espacios limitados, gire el manillar en la dirección que desea ir y aplique la potencia suavemente. El scooter puede girar muy apretado con total estabilidad a bajas velocidades.

Antes de retroceder, asegúrese de que el área detrás del scooter esté libre de obstáculos o peligros. Ajuste la velocidad a baja antes de retroceder. Manténgase alejado de todos los rincones y obstáculos.

Rampas/pendientes

La estabilidad de su scooter depende de varios factores, como la altura del asiento, el ángulo de inclinación y la altura y el peso del usuario. Al acercarse a una pendiente, hágalo directamente y no en ángulo y evite hacer giros cuando sea posible.

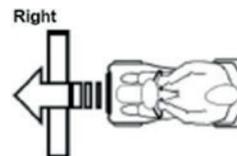

Superficies

Su scooter funcionará bien en muchas superficies. Sin embargo, evite la hierba larga, grava suelta, arena, barro y hielo.

Transferencia

Levante el brazo del lado que desea dejar o siéntese en el scooter. Use una ayuda para el equilibrio si es necesario. NO use el manillar o los reposabrazos para apoyar todo el peso durante las transferencias.

7 Almacenamiento

El scooter debe almacenarse en un ambiente seco, preferiblemente en un garaje o cobertizo. Las lonas y cubiertas pueden crear condensación durante ciertas condiciones climáticas.

Si su scooter se va a almacenar por períodos prolongados, cargue completamente las baterías y desconecte los enchufes de la batería.

El clima muy frío puede agotar severamente la condición de la batería (hasta 40%). Si se deja durante algún período durante el clima frío, es muy importante que el scooter esté completamente cargado antes de usarlo.

8 Baterías y cargadores

Baterías

Cargue las baterías completamente (8-12 horas) antes del primer uso.

El Scooter Mallorca utiliza dos baterías de plomo ácido selladas de 38 A y 12 voltios. Las baterías están ubicadas en un paquete de baterías debajo de la parte delantera del asiento. Se pueden quitar fácilmente simplemente levantándolo por el asa en la parte superior. Siempre asegúrese de que las baterías se reubiquen correctamente antes de usarlas.

Las bajas temperaturas, el terreno irregular y el peso del usuario pueden afectar el rendimiento de la batería. El medidor de batería es solo una guía del nivel de carga restante en sus baterías y le dará su mejor indicación mientras el scooter está en movimiento.

Las baterías deben ser recomendadas por TOTAL CARE, si es necesario reemplazarlas un distribuidor autorizado de TOTAL CARE debe realizar el reemplazo de la batería.

Cargador de batería

El cargador de batería es un tipo de interruptor de 3 amperios. El puerto de carga de la batería se encuentra en la parte frontal de la caja de la batería (ver imagen a continuación). Antes de usar su scooter por primera vez, asegúrese de cargar completamente las baterías, esto puede tardar hasta 12 horas.

Para cargar las baterías conecte el enchufe del cargador macho de 3 pines en la toma de carga en la parte frontal de la batería. Conecte el enchufe de 3 clavijas a una toma de corriente y enciéndalo. Se mostrará una luz roja constante cuando el cargador de batería esté conectado y la carga esté en marcha.

La luz roja indica que el cargador está encendido y conectado a las baterías. El LED verde se iluminará cuando se complete el ciclo de carga. Siempre apague la alimentación del cargador antes de desconectar el enchufe de la caja de la batería.

No cargue las baterías por más de 12 horas. Cargue siempre las baterías en un área interior bien ventilada.

Debe seguir cargando las baterías incluso si el scooter no se va a utilizar durante un período prolongado de tiempo (2 a 3 semanas). De lo contrario, podría provocar daños permanentes y dejar las baterías inutilizables.

Siempre que sea posible, no interrumpa el ciclo de carga hasta que las baterías estén completamente cargadas. La interrupción continua puede dañar permanentemente las baterías. Si el cable de carga se daña, deje de usarlo inmediatamente y busque un reemplazo de su distribuidor.

UTILICE SOLO EL CARGADOR SUMINISTRADO CON SU SCOOTER. No deje el cargador enchufado al puerto del cargador después de que se complete la carga. Quite las llaves del scooter cuando se cargue.

Eliminación y reciclaje de la batería usada.

Las baterías siempre deben reciclarse correctamente. No los deseche con sus restos domésticos.

Para obtener más información sobre la instalación de reciclaje más cercana, comuníquese con su autoridad local.



9 Mantenimiento

Esperanza de vida del producto

Su scooter ha sido diseñado para proporcionar al usuario una vida larga y confiable, siempre que un distribuidor autorizado lo mantenga y le dé servicio de manera correcta.

Limpieza general

Las cubiertas y el asiento del scooter deben limpiarse con un paño húmedo y detergente suave. No use limpiadores abrasivos o solventes, ya que esto dañará los componentes plásticos. No rocíe agua (manguera o lavadora a presión) sobre el scooter, ya que esto puede dañar los componentes electrónicos.

Sugerimos que su scooter se someta a un servicio completo al menos una vez al año por un distribuidor autorizado de TOTALCARE EUROPE, S.L.

Lista de verificación

Verifique lo siguiente antes de su uso

- »» Los neumáticos están en buenas condiciones (presión de 25 a 30 psi).
- »» Las ruedas delanteras giran libremente.
- »» Las piezas móviles, los pivotes y la fijación del marco no están dañados ni desgastados.
- »» Todos los pomos y palancas son seguras.

10 Solución de problemas

Este scooter está equipado con lo último en controles electrónicos que están programados para proteger el sistema eléctrico de sobrecargas anormales.

Fusibles

Hay dos fusibles en los cables de la batería para brindar protección contra una posible sobrecarga en el cableado.

Lista de verificación

Verifique lo siguiente antes de su uso

- »» La unidad está encendida.
- »» Todos los enchufes y conexiones están firmemente fijados.
- »» El nivel de la batería muestra carga completa.
- »» El dispositivo de marcha libre está en la posición de conducción.
- »» El disyuntor no se ha disparado.

Si el dispositivo de rueda libre ha sido operado con el scooter encendido, el scooter no funcionará hasta que el interruptor de llave se haya apagado y encendido nuevamente.

Si ocurre una falla, la falla se identificará mediante una secuencia de pitidos que se relaciona con la falla en la tabla a continuación.

Pitidos	Descripción	Condición del scooter	Acción
1	Nivel batería bajo	funciona lentamente	Baterías de menos de 23.3v. Cargue lo antes posible.
2	Nivel batería bajo	No se mueve	Recargue tan pronto como sea posible.

3	Fallo nivel Batería alto	no funcionará	Verifique todas las conexiones entre el motor y la batería. Posible sobregeneración. Reduzca la velocidad si viaja cuesta abajo.
4	Pausa		Consumo excesivo de corriente en la unidad de control. Apague, deje por unos minutos y vuelva a encender.
5	Rueda libre activada.		Verifique la posición de la palanca de rueda libre. Posible falla del freno.
6	Circuito de inhibición activado. Fallo palanca de aceleración	El scooter no funcionará.	El scooter no funcionará. Verifique que el cargador no esté conectado o que haya una falla del controlador. Verifique la palanca de aceleración ya sea defectuosa o no en la posición neutral.
7	Error velocidad	El scooter no funcionará.	Posible falla de cableado con el potenciómetro de velocidad.
8	Falla del motor	El scooter no funcionará.	Verifique que todas las conexiones estén seguras. Enciende y apaga el scooter, esto puede borrar el código.
9	Otro error	El scooter no funcionará	Posible falla del controlador.

Si su scooter no funciona después de verificar estos posibles problemas, consulte a su distribuidor local de TOTAL CARE EUROPE inmediatamente.

Si el scooter está encendido y no funciona durante un período de tiempo (aproximadamente 10 minutos), puede entrar en modo de "suspensión". Esto se indica cuando la llave parpadea continuamente. Simplemente apague y encienda el scooter para reiniciar el controlador.

11 Más información

Información de seguridad sobre interferencia electromagnética (EMI)

Los Scooter están diseñadas para operar bajo ciertas condiciones. Sin embargo, las ondas de radio o los campos electromagnéticos pueden afectar el funcionamiento del scooter.

La fuente de EMI podría ser transmisores de radio o televisión o dispositivos portátiles como teléfonos móviles, radios CB portátiles, etc. En caso de que se produzca algún movimiento involuntario, apague el scooter lo antes posible.

Energía solar

Durante los períodos de clima soleado, es posible que las superficies de su scooter puedan alcanzar altas temperaturas (como con los vehículos de motor). Tome precauciones si deja el scooter expuesto a la luz solar directa durante un período de tiempo. Busque sombra o cubra el asiento y los controles manuales para mantener al mínimo cualquier aumento de temperatura.

Factores de salud

La idoneidad para este producto se ha evaluado según el estado de salud actual del usuario. Es esencial que el usuario controle regularmente su capacidad para usar el scooter de forma segura.

Uso general

Tenga en cuenta la información proporcionada en este manual con respecto a la seguridad y el mantenimiento de su scooter. Si se cumple, su scooter debería brindarle años de movilidad confiable.

Almacenamiento y cuidado general

Recomendamos que el scooter se almacene siempre en un ambiente seco como un garaje o cobertizo para proteger el chasis y otros componentes de la corrosión. No deje el scooter afuera durante las tormentas. Si el scooter está mojado, límpielo con un paño seco para asegurarse de que no ingrese agua en los componentes internos del scooter.

Durante el uso diario, no lo use en duchas de lluvia ni viaje a través de charcos. Evite su uso en áreas donde el scooter podría contaminarse con arena o materiales abrasivos.

Procedimientos de emergencia

Si su scooter se comporta de manera errática o no responde mientras conduce, suelte la palanca de aceleración para que pueda volver a su posición neutral y desconecte la alimentación con la tecla / interruptor. Utilice el freno de mano de emergencia si es necesario. Estos procedimientos detendrán el scooter y activarán el sistema de frenado, evitando más maniobras incontroladas.

Apagar la alimentación con la llave / interruptor puede hacer que el scooter se detenga bruscamente y solo debe usarse para detener el scooter durante una emergencia, ya que esto puede dañar la unidad de manejo.

Estabilidad del producto

Los scooters y las sillas de ruedas eléctricas están diseñados para permitir al usuario flexibilidad de movimiento en áreas restringidas. Conducir a la máxima velocidad e intentar giros bruscos puede crear una situación en la que el producto se vuelve inestable. Por lo tanto, es esencial que el usuario preste atención a la guía establecida en este manual.

A Los principales factores que afectan la estabilidad son:

Configuración de velocidad máxima

- »» Altura del asiento
- »» Movimiento del usuario
- »» Maniobras del usuario
- »» Pendientes o rampas

Mantenga su velocidad a un nivel en el que pueda detenerse de manera segura sin tener que hacer giros erráticos.

No cargue bolsas, etc. en el respaldo del asiento, ya que esto afectará el centro de gravedad y podría causar inestabilidad.

No se incline fuera de la "huella" del producto, especialmente mientras se mueve. Evite girar en pendientes o rampas.

Conducir en zonas peatonales

Como se mencionó anteriormente, cuando use el scooter en áreas peatonales, siempre baje su velocidad máxima a la de los peatones que lo rodean. Recuerde la distancia de frenado de su scooter y siempre deje suficiente espacio para detenerse de manera segura para evitar colisiones con peatones u otros objetos.

12 Garantía

Duración de la garantía:

El producto adquirido por Ud. queda protegido por la presente garantía, por la falta de conformidad del cliente que se manifieste en el plazo de 2 años desde la fecha de compra del producto o la fecha de entrega.

Alcance de la garantía:

La garantía cubre toda avería o defecto de fabricación durante los primeros 6 meses desde la compra del producto, a partir del 6 mes y hasta los dos años, el consumidor debe seguir dirigiéndose a la parte vendedora para conseguir reparar la falta de conformidad del bien, pero en el caso necesario el usuario deberá demostrar que el producto esta defectuoso por fabricación y no por un mal uso o una falta de mantenimiento.

El alcance territorial de esta Garantía es para todo el territorio nacional español.

La presente Garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a lo establecido en la ley 1/2007, de 16 de noviembre, de Garantías en la venta de Bienes de consumo.

Procedimiento para hacer efectiva la garantía:

Para poder hacer efectiva la Garantía el consumidor deberá dirigirse al punto de venta donde adquirido el producto, en el caso de que le sea imposible la comunicación con el punto de venta, ya sea porque ha cerrado o porque ha adquirido el producto en otra comunicad autónoma, se podrá dirigir directamente al fabricante a través del correo electrónico info@totalcare-europe.com.

Es imprescindible presentar copia de la factura o del ticket de compra, o un albarán de entrega posterior a la factura o ticket, en el momento de la reclamación, donde ampare claramente el producto comprado y la fecha.

El consumidor deberá entregar el producto en el mismo lugar que los adquirió, acompañando una nota explicativa de la falta de conformidad.

La presente garantía no cubre:

- Los daños causados por mal uso por parte del usuario al no obedecer las instrucciones indicadas en este manual o causadas por otros factores humanos, mal uso, colisión con algún objeto...
- Los daños causados por accidente, abuso, negligencia o mal uso.
- Los daños causados por fuego, inundación, tormentas o cualquier evento de la naturaleza.
- Los productos que hayan sido previamente reparados o manipulados por personal no autorizado por el fabricante o vendedor.
- Si las piezas utilizadas no son fabricadas por nuestra empresa.
- Cualquier producto que no lleve o tenga alterado o borrado su numero de serie o de fábrica.
- La garantía no cubre los elementos de desgaste.
- Las reparaciones o sustitución de la pieza defectuosa serán efectuadas por un personal cualificado y autorizado por TotalCare Europe, S.L.



Scooter Mallorca



Tel: 935 942 066
E-Mail: info@totalcare-europe.com
www.totalcare-europe.com

TotalCare Europe
Calle Amsterdam 1-3
08191 Rubí · España



www.totalcare-europe.com



www.twitter.com/imtotalcare



www.facebook.com/imtotalcare

13/11/2019